

Instructivo 240603

Gastrocut*

Clave B025105

L 25 cm. DI 6.35 mm. DE 9.53 mm.

Etiqueta Gastrocut* 05 esp.

Descripción en idioma español de clave, dimensiones, contenido, condiciones, lote, caducidad y registros legales del producto



el gastrocut 05 esp.

Marca: **gastrocut*** silicona

Clave: **B025105** Dim: L (25 cm.) DI (6.35 mm) DE (9.53 mm)


Presentación: **Bolsa con una sonda de silicona, para gastrotomía, útil en la conducción de alimentos al interior la cavidad gástrica. En condición estéril R/Gamma.**

Controles: **Lote: B025105150603-01, Caducidad: 030208**

Registros: **SSA 1409C90**




Despiece y contenido

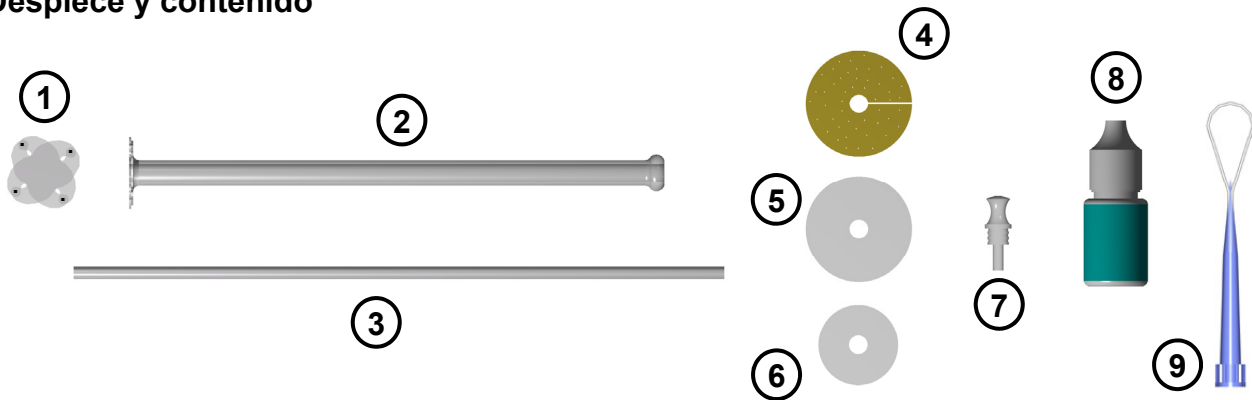

1. Punta helicoidal detectable a Rayos X, vista anterior
2. Sonda completa vista lateral
3. Guía para reposicionar o extracción de sonda
4. Esponja oclusal hipoalergénica para proteger el orificio de salida
5. Pieza mayor para ajuste de distancia entre punta y piel
6. Pieza menor para ajuste de distancia entre punta y piel
7. Tapón para sonda fuera de uso
8. Ultra Flux* ultra lubricante no toxico para mantenimiento funcional de la sonda
9. Aditamento guía para acoplamiento endoscópico.

Procedimientos de preparación, recambio y mantenimiento.

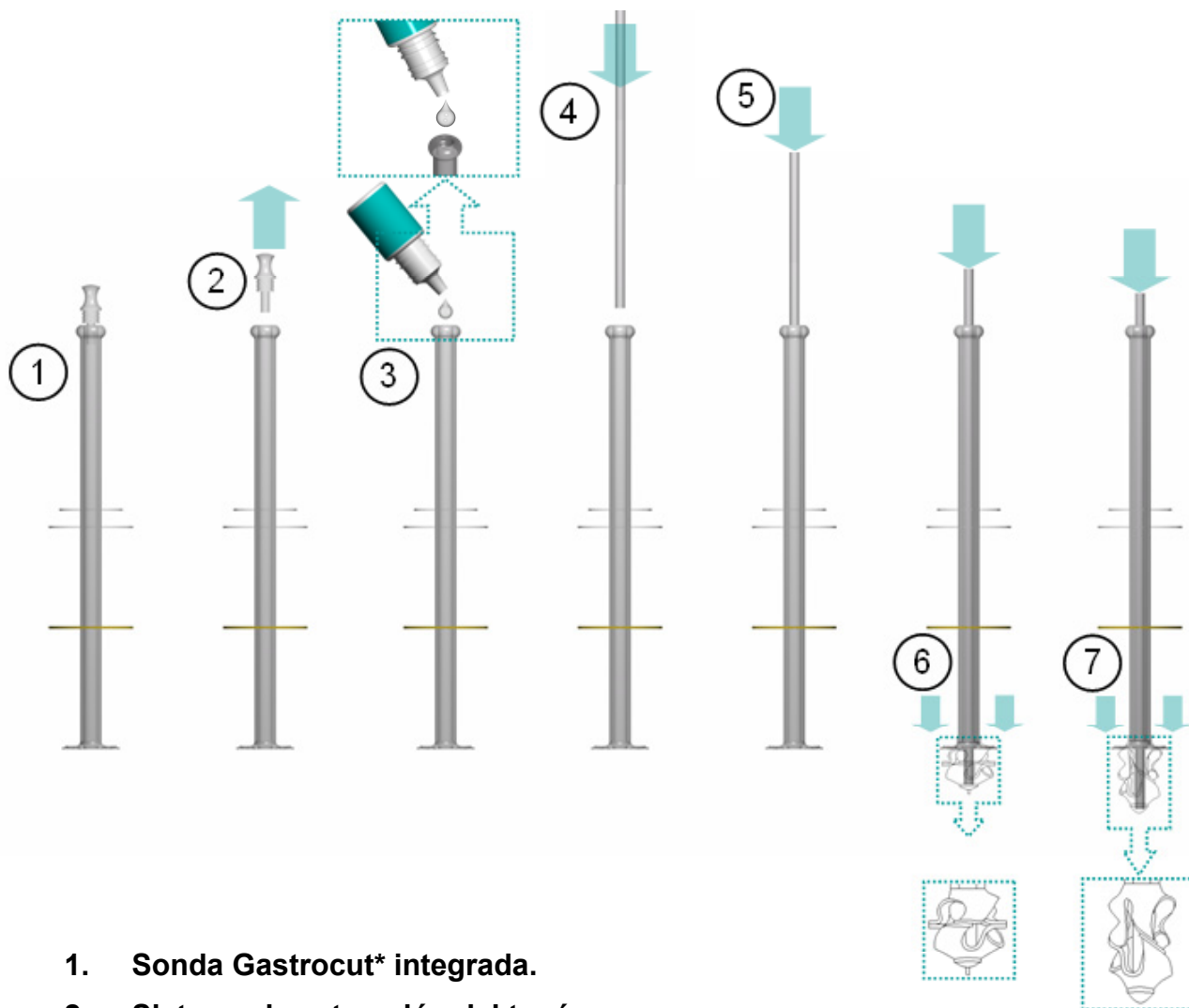

1. Sonda Gastrocut* integrada.
2. Sistema de extracción del tapón
3. Sistema de aplicación Ultra Flux*
4. Primer tiempo sistema de aplicación para guía
5. Segundo tiempo aplicación de guía
6. Tercer tiempo, extensión de la punta inducida por la guía
7. Cuarto tiempo, extensión completa de la punta inducida por la guía, posición final para reposición o extracción a través del túnel de la gastrotomía. Se recomienda el uso de gel de celulosa para este procedimiento.